

Informacje dla użytkownika

2.1 Instrukcja używania

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją używania. Zachowaj tę instrukcję używania, w razie potrzeby ponownego przeczytania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

CO TO JEST OSPA WIETRZNA?

Ospa wietrzna jest infekcją wirusową, która powoduje łagodną gorączkę i swędzącą wysypkę pęcherzykową ze stanem zapalnym, która pojawia się na całym ciele. Wirusem, który powoduje ospę wietrzną, jest wirus *Varicella zoster*, należący do rodziny wirusów opryszczki. Ospa wietrzna jest chorobą wysoce zakaźną, łatwo przenosi się za pośrednictwem płynu z pęcherzyków lub śliny osoby zakażonej. Osoba chora na ospę wietrzną staje się źródłem zakażenia już na kilka dni przed pojawieniem się pęcherzyków i pozostaje nim, dopóki wszystkie pęcherzyki nie przyschną. Wtórne zakażenie bakteryjne skóry jest najczęstszym powikłaniem ospy u dzieci. Rozdrapywanie pęcherzyków może zwiększać ryzyko wtórnego zakażenia.

JAK DZIAŁA OSPA COMFORT SPRAY?

OSPA COMFORT SPRAY jest wyrobem medycznym do samodzielnego stosowania, zawierającym aktywny składnik Olile-Active™, stosowanym w celu łagodzenia objawów ospy wietrznej oraz zapobiegania wtórnemu zakażeniu. Aerosol tworzy warstwę ochronną na zmianach skórnych. Warstwa ta stanowi barierę zapewniającą ochronę ran, zapobiega zakażeniu, a także zapewnia działanie kojące oraz chłodzące, łagodząc świąd. Aerosol zapobiega powstawaniu blizn poprzez zapobieganie i leczenie wtórnych zakażeń.

CO MUSI WIEDZIEĆ PACJENT PRZED ZASTOSOWANIEM OSPA COMFORT SPRAY

Nie stosować OSPA COMFORT SPRAY, jeśli:

- Pacjent ma alergię na jeden ze składników.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
 - Pacjentka jest w ciąży i występują u niej objawy ospy wietrznej,
 - Dziecko ma mniej niż 6 miesięcy,
 - Pacjent nie odczuwa ulgi po 5 dniach stosowania preparatu lub gdy dolegliwości skórne nie zmniejszają się lub ulegają pogorszeniu,
 - Skóra jest podrażniona po użyciu preparatu.

OSPA COMFORT SPRAY w połączeniu z innymi metodami leczenia ospy wietrznej

Nie są znane żadne interakcje z innymi metodami leczenia ospy wietrznej, jeśli preparat jest stosowany zgodnie z instrukcją używania.

OSPA COMFORT SPRAY w połączeniu z lekami

Nie są znane żadne interakcje z innymi lekami, jeśli preparat jest stosowany zgodnie z instrukcją używania.

KTO MOŻE STOSOWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?

OSPA COMFORT SPRAY może być stosowany u dzieci w wieku od 6 miesięcy życia i osób dorosłych.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem OSPA COMFORT SPRAY w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAK STOSOWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?

Przed zastosowaniem należy dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Przed pierwszym użyciem konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie pompki dozownika. Należy rozpylać na obszar skóry zajęty chorobą w odległości 10-15 cm. W celu uzyskania równomiernego rozpylania, należy mocno nacisnąć pompkę dozownika do samego końca. Aerosol należy stosować co najmniej 3 razy na dobę lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości. W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerosol można umieścić w lodówce.

Jeśli dysza zostanie zatkana, należy wyczyścić ją ciepłą wodą. Preparat może być również skutecznie stosowany w pozycji odwróconej.

JAKIE SĄ MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, KIEDY STOSOWANY JEST OSPA COMFORT SPRAY?

Nie są znane żadne działania niepożądane w przypadku, gdy preparat jest stosowany zgodnie z instrukcją używania.

JAKIE SUBSTANCJE SĄ ZAWARTE W OSPA COMFORT SPRAY?

Olile-Active™, Aqua, Coco-Caprylate/Caprates, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22 Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.

JAK PRZECHOWYWAĆ OSPA COMFORT SPRAY?

- OSPA COMFORT SPRAY należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (15-25°C).
- Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy stosować OSPA COMFORT SPRAY po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku zewnętrznym.

CO ZAWIERA OPAKOWANIE?

W opakowaniu znajduje się aerosol o objętości 30 ml ^e oraz ulotka.

Wytwórca: Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Holandia.


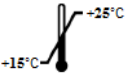




Dystrybutor:
Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Książnica 4a lok. 7
01-607 Warszawa

Ostatnia aktualizacja tej instrukcji używania została wykonana w sierpniu 2017.

[Instrukcja stosowania numer produktu: do dostarczenia przez Medical Brands]



ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI

	Informacje o wytwórcy
	Produkt musi być przechowywany w bezpiecznym, suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej (15-25°C)
	Produkt nie może być stosowany po upływie terminu ważności.
e	Szacunkowy znak oznacza, że opakowanie jest wypełnione zgodnie z odpowiednią dyrektywą europejską
	Numer serii produktu
	Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia
	Oznakowanie CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania obowiązującej dyrektywy europejskiej

Informacje dla użytkownika

2.2 Pudełko zewnętrzne

[PANEL GÓRNY]]
LOGO ALVOGEN
OSPA COMFORT SPRAY

[PANEL PRZEDNI]
LOGO ALVOGEN
OSPA COMFORT SPRAY

DZIAŁANIE

Dla osób chorych na ospę wietrzną
Szybko łagodzi świąd – objaw ospy wietrznej
Chroni przed wtórnym zakażeniem bakteryjnym skóry
Pomaga zapobiec bliznowaceniowi ran

[PANEL PRAWY]



Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Holandia

DYSTRYBUTOR

Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Książnica 4a lok. 7
01-607 Warszawa



SPOSÓB UŻYCIA

OSPA COMFORT SPRAY może być stosowany u dzieci w wieku od 6 miesiąca życia i osób dorosłych.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu OSPA COMFORT SPRAY w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Aerozol należy rozpylać w odległości 10-15 cm. Przed pierwszym użyciem konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie pompki dozownika. Pompkę dozownika mocno nacisnąć do samego końca. Aerozol należy stosować na obszar zajęty chorobą co najmniej 3 razy na dobę lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.

Przed użyciem OSPA COMFORT SPRAY należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania. W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerozol można umieścić w lodówce.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol 30 ml ^e oraz ulotka

[PANEL LEWY]

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować wyrobu medycznego, w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować OSPA COMFORT SPRAY po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku zewnętrznym.

SKŁADNIKI

Olile-Active™, Aqua, Coco-caprylate/Caprates, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22 Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.

[PANEL DOLNY]

Numer produktu Medical Brands Developments B.V.



Prawy dolny flap

Numer produktu na pudełku zewnętrznym: do dostarczenia przez Medical Brands

Informacje dla użytkownika

2.3 Etykieta

Wyrób medyczny do samodzielnego stosowania. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.

OSPA COMFORT SPRAY

DZIAŁANIE

Dla osób chorych na ospę wietrzną
Szybko łagodzi świąd – objaw ospy wietrznej
Chroni przed wtórnym zakażeniem bakteryjnym skóry
Pomaga zapobiec bliznowaceniowi ran

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 ml



Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Holandia

DYSTRYBUTOR

Alvogen Pharma Sp. z o.o.
ul. Książnica 4a lok. 7
01-607 Warszawa



Nie stosować wyrobu medycznego, w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Numer produktu: należy określić przed wysłaniem tego dokumentu przez Medical Brands.





SKŁADNIKI

Olile-Active™, Aqua, Coco-caprylate/Caprata, Glycerin, Laureth-9, Zinc Oxide, C14-22 Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Citric Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją używania.

Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia i osób dorosłych.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu OSPA COMFORT SPRAY w okresie ciąży lub karmienia piersią.


Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Aerozol należy rozpylać w odległości 10-15 cm. Pompkę dozownika mocno nacisnąć do samego końca. Przed pierwszym użyciem konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie pompki dozownika.

Aerozol należy stosować na obszar zajęty chorobą co najmniej 3 razy na dobę lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.

W celu uzyskania dodatkowego efektu chłodzenia, przed zastosowaniem aerozol można umieścić w lodówce.

PRZECHOWYWANIE

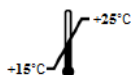

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.